
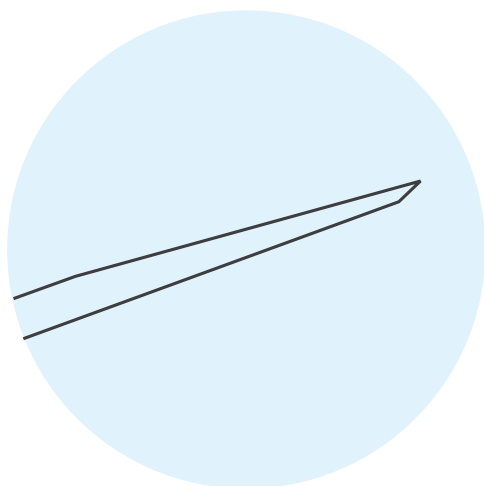
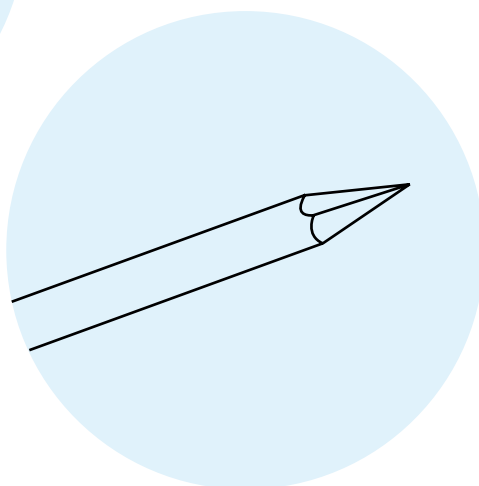


Fili di Kirschner

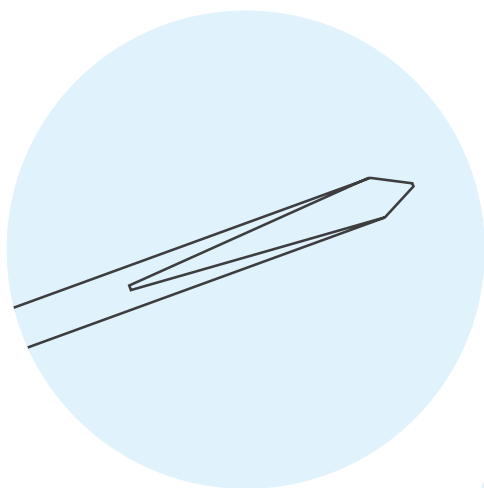

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

INDICE

INDICAZIONI	4
TECNICA CHIRURGICA	4
INFORMAZIONI PER ORDINE	5

INDICAZIONI

I fili di Kirschner Citieffe sono indicati per:

- osteosintesi di minima;
- osteosintesi percutanea;
- osteosintesi endomidollare di piccoli segmenti;
- trazione transcheletrica;
- mantenimento temporaneo della riduzione;
- guida nell'impianto di altri dispositivi.

TECNICA CHIRURGICA

STEP 1

Se necessario, in riferimento all'indicazione, procedere con la riduzione della frattura.

STEP 2

Selezionare il filo della lunghezza, del diametro e del materiale desiderato in relazione alla tipologia di utilizzo.

È possibile procedere all'inserimento dei fili utilizzando strumenti chirurgici generali o con motore a basso numero di giri.

STEP 3


Se necessario, è possibile, piegare o tagliare la porzione di filo in eccesso.

STEP 4

Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti chirurgici generali.

INFORMAZIONI PER ORDINE

Filo di Kirschner PUNTA LANCIA, acciaio

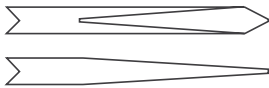

Codice	Misura	Qt. per confezione
641008150	ø0,8x150mm	25
641008310	ø0,8x310mm	25
641010150	ø1,0x150mm	25
641010310	ø1,0x310mm	25
641012150	ø1,2x150mm	25
641012310	ø1,2x310mm	25
641014150	ø1,4x150mm	25
641014310	ø1,4x310mm	25
641015150	ø1,5x150mm	25
641015310	ø1,5x310mm	25
641016150	ø1,6x150mm	25
641016310	ø1,6x310mm	25
641018150	ø1,8x150mm	25
641018310	ø1,8x310mm	25
641018370	ø1,8x370mm	25
641018400	ø1,8x400mm	25

Codice	Misura	Qt. per confezione
641020150	ø2,0x150mm	25
641020310	ø2,0x310mm	25
641020330	ø2,0x330mm	25
641020400	ø2,0x400mm	25
641022150	ø2,2x150mm	25
641022310	ø2,2x310mm	25
641024150	ø2,4x150mm	25
641024310	ø2,4x310mm	25
641025150	ø2,5x150mm	25
641025310	ø2,5x310mm	25
641025330	ø2,5x330mm	25
641030150	ø3,0x150mm	25
641030310	ø3,0x310mm	25
641030330	ø3,0x330mm	25
641420450	ø2,0x450mm c/oliva	25


Filo di Kirschner DOPPIA PUNTA LANCIA, acciaio



Codice	Misura	Qt. per confezione
642008150	ø0,8x150mm	25
642008310	ø0,8x310mm	25
642010150	ø1,0x150mm	25
642010180	ø1,0x180mm	25
642010200	ø1,0x200mm	25
642010250	ø1,0x250mm	25
642010300	ø1,0x300mm	25
642010310	ø1,0x310mm	25
642012150	ø1,2x150mm	25
642012310	ø1,2x310mm	25
642014150	ø1,4x150mm	25
642014310	ø1,4x310mm	25
642015150	ø1,5x150mm	25
642015230	ø1,5x230mm	25
642015180	ø1,5x180mm	25
642015200	ø1,5x200mm	25
642015250	ø1,5x250mm	25
642015300	ø1,5x300mm	25
642015310	ø1,5x310mm	25
642016150	ø1,6x150mm	25
642016310	ø1,6x310mm	25
642018150	ø1,8x150mm	25
642018310	ø1,8x310mm	25
642020150	ø2,0x150mm	25
642020180	ø2,0x180mm	25
642020200	ø2,0x200mm	25
642020250	ø2,0x250mm	25
642020300	ø2,0x300mm	25
642020310	ø2,0x310mm	25
642020350	ø2,0x350mm	25

Codice	Misura	Qt. per confezione
642022150	ø2,2x150mm	25
642022200	ø2,2x200mm	25
642022310	ø2,2x310mm	25
642024150	ø2,4x150mm	25
642024310	ø2,4x310mm	25
642025150	ø2,5x150mm	25
642025180	ø2,5x180mm	25
642025200	ø2,5x200mm	25
642025250	ø2,5x250mm	25
642025300	ø2,5x300mm	25
642025310	ø2,5x310mm	25
642030150	ø3,0x150mm	25
642030180	ø3,0x180mm	25
642030200	ø3,0x200mm	25
642030250	ø3,0x250mm	25
642030300	ø3,0x300mm	25
642030310	ø3,0x310mm	25
642030350	ø3,0x350mm	25
642030400	ø3,0x400mm	25
642035180	ø3,5x180mm	25
642035200	ø3,5x200mm	25
642035250	ø3,5x250mm	25
642035300	ø3,5x300mm	25
642035350	ø3,5x350mm	25
642035400	ø3,5x400mm	25
642040250	ø4,0x250mm	25
642040310	ø4,0x310mm	25
642040350	ø4,0x350mm	25
642040400	ø4,0x400mm	25

Filo di Kirschner PUNTA TROCAR, acciaio

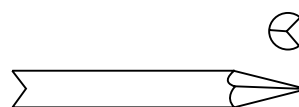

Codice	Misura	Qt. per confezione
643006150	ø0,6x150mm	25
643006310	ø0,6x310mm	25
643008150	ø0,8x150mm	25
643008310	ø0,8x310mm	25
643010150	ø1,0x150mm	25
643010310	ø1,0x310mm	25
643012080	ø1,2x80mm	25
643012120	ø1,2x120mm	25
643012150	ø1,2x150mm	25
643012310	ø1,2x310mm	25
643014150	ø1,4x150mm	25
643014310	ø1,4x310mm	25
643015150	ø1,5x150mm	25
643015310	ø1,5x310mm	25
643016120	ø1,6x120mm	25
643016150	ø1,6x150mm	25
643016310	ø1,6x310mm	25
643018150	ø1,8x150mm	25
643018310	ø1,8x310mm	25
643018370	ø1,8x370mm	25
643018400	ø1,8x400mm	25

Codice	Misura	Qt. per confezione
643020150	ø2,0x150mm	25
643020200	ø2,0x200mm	25
643020310	ø2,0x310mm	25
643020400	ø2,0x400mm	25
643022150	ø2,2x150mm	25
643022310	ø2,2x310mm	25
643024150	ø2,4x150mm	25
643024310	ø2,4x310mm	25
643025150	ø2,5x150mm	25
643025200	ø2,5x200mm	25
643025310	ø2,5x310mm	25
643028150	ø2,8x150mm	25
643028310	ø2,8x310mm	25
643030150	ø3,0x150mm	25
643030200	ø3,0x200mm	25
643030310	ø3,0x310mm	25
643032075	ø3,2x75mm	25
643032100	ø3,2x100mm	25
643035310	ø3,5x310mm	25
643040310	ø4,0x310mm	25


Filo di Kirschner DOPPIA PUNTA TROCAR, acciaio



Codice	Misura	Qt. per confezione
644006150	ø0,6x150mm	25
644008070	ø0,8x70mm	25
644008100	ø0,8x100mm	25
644008150	ø0,8x150mm	25
644008310	ø0,8x310mm	25
644010060	ø1,0x60mm	25
644010100	ø1,0x100mm	25
644010120	ø1,0x120mm	25
644010150	ø1,0x150mm	25
644010310	ø1,0x310mm	25
644012150	ø1,2x150mm	25
644012310	ø1,2x310mm	25
644014150	ø1,4x150mm	25
644014310	ø1,4x310mm	25
644015150	ø1,5x150mm	25
644015200	ø1,5x200mm	25
644015210	ø1,5x210mm	25
644015220	ø1,5x220mm	25
644015310	ø1,5x310mm	25
644016150	ø1,6x150mm	25
644016310	ø1,6x310mm	25
644018150	ø1,8x150mm	25
644018220	ø1,8x220mm	25
644018310	ø1,8x310mm	25

Codice	Misura	Qt. per confezione
644020150	ø2,0x150mm	25
644020200	ø2,0x200mm	25
644020220	ø2,0x220mm	25
644020280	ø2,0x280mm	25
644020310	ø2,0x310mm	25
644022150	ø2,2x150mm	25
644022280	ø2,2x280mm	25
644022310	ø2,2x310mm	25
644024150	ø2,4x150mm	25
644024280	ø2,4x280mm	25
644025150	ø2,5x150mm	25
644025200	ø2,5x300mm	25
644025310	ø2,5x310mm	25
644028150	ø2,8x150mm	25
644030150	ø3,0x150mm	25
644030200	ø3,0x200mm	25
644030310	ø3,0x310mm	25
644035310	ø3,5x310mm	25
644045310	ø4,5x310mm	25
644050310	ø5,0x310mm	25
644055310	ø5,5x310mm	25
644060310	ø6,0x310mm	25
644064310	ø6,4x310mm	25

Filo di Kirschner BECCO FLAUTO, acciaio

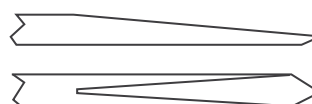


Codice	Misura	Qt. per confezione
SF6414	ø1,5x400mm, c/cono	5
SF6415	ø1,8x400mm, c/cono	5
SF6416	ø1,5x310mm, c/oliva	5

Codice	Misura	Qt. per confezione
SF6417	ø1,8x310mm, c/oliva	5
SF6418	ø1,5x400mm, c/oliva	5
SF6419	ø1,8x400mm, c/oliva	5

STERILE **Filo di Kirschner PUNTA TROCAR, titanio**

Codice	Misura	Qt. per confezione
1710150	ø1x150mm	1
1710220	ø1x220mm	1
1714150	ø1,4x150mm	1

Codice	Misura	Qt. per confezione
1714220	ø1,4x220mm	1
1720150	ø2x150mm	1
1720220	ø2x220mm	1

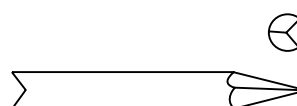Filo di Kirschner PUNTA TROCAR, acciaio

Codice	Misura	Qt. per confezione
643418400	ø1,8x400mm, c/oliva	1
643518400	ø1,8x400mm, c/oliva	5
643718310	ø1,8x310mm	3
643718400	ø1,8x400mm	3
643118400	ø1,8x400mm	5
643130350	ø3x350mm	5

Codice	Misura	Qt. per confezione
66010	ø1x150mm	1
66014	ø1,4x150mm	1
66020	ø2x150mm	1
66042	ø2,5x250mm	1
66214	ø1,4x270mm	1
66220	ø2x270mm	1
662025	ø2x250mm c/manico	1

Filo guida, acciaio

Codice	Misura	Punta	Qt. per confezione
66989 *	ø3x350mm	elicoidale	1
66990	ø3x350mm	elicoidale	1
66991 *	ø2,4x310mm	elicoidale	1
66996	ø2,4x280mm, c/asola	elicoidale	1
66997	ø2,4x220mm, autorompente	elicoidale	1
66998	ø3x220mm	elicoidale	1
66980	ø3x300mm	elicoidale	1
66999	ø2,4x435mm, c/asola	trocar zigrinata	1
66987	ø3x350mm	trocar	1
66992	ø2,4x280mm, c/asola	trocar zigrinata	1
66995 *	ø3x300mm, c/asola	trocar	1

* NON STERILE

STERILE

Filo di Kirschner PUNTA TROCAR FILETTATA, acciaio



Codice	Misura	Qt. per confezione
66410	ø1x150mm	1
66414	ø1.4x150mm	1
66420	ø2x150mm	1

Codice	Misura	Qt. per confezione
66730	ø2,5x300mm	1
66735	ø2,5x350mm	1
66740	ø2,5x400mm	1
66830	ø3x300mm	1
66835	ø3x350mm	1
66840	ø3x400mm	1



Filo di Kirschner PUNTA TROCAR FILETTATA, titanio



Codice	Misura	Qt. per confezione
1725300	ø2,5x300mm	1
1725350	ø2,5x350mm	1
1725400	ø2,5x400mm	1
1730300	ø3x300mm	1
1730350	ø3x350mm	1
1730400	ø3x400mm	1

Fili di Kirschner



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

DISTRIBUTORE