

Tecnica chirurgica



CAMBRE

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

INDICE

CAMBRA PER LEGAMENTI	4
CAMBRA A SEZIONE TRIANGOLARE	6
CAMBRA A SCALINO	7
CAMBRA TIPO BLOUNT	8

CAMBRA PER LEGAMENTI

INDICAZIONI

Le cambre per legamenti a 2 e 4 punte, con e senza denti, sono indicate per interventi di ligamentopessi e tenodesi.



TITANIO



CROMO-COBALTO



ACCIAIO



ACCIAIO

PLANNING PREOPERATORIO

Eseguire un attento piano preoperatorio e selezionare la misura idonea all'impianto.

La presenza delle punte nella parte terminale degli steli consente una facile penetrazione nell'osso corticale senza necessità di preforatura.



IMPIANTO

Dopo aver selezionato la cambra da impiantare, utilizzare l'apposito battitore che consente un perfetto collegamento della cambra e ne facilita l'impianto.

Procedere assicurandosi che il legamento sia ben tensionato e aderente alla superficie ossea alla quale deve essere fissato.


Rimuovere il battitore e assicurarsi del corretto affondamento.




INFORMAZIONI PER ORDINE

TITANIO

STERILE

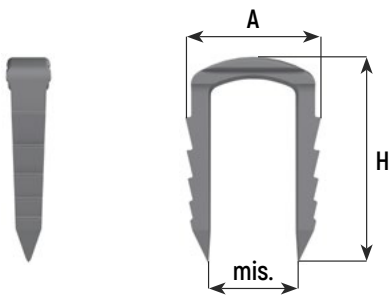

Codice	mis.	A (mm)	H (mm)
39355	6	10.4	19
39356	8	12.4	19
39357	10	14.4	19

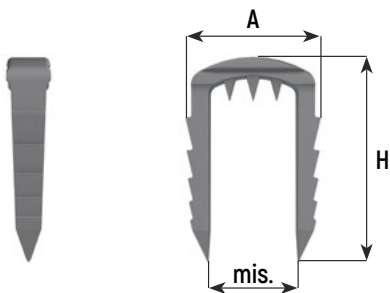


Codice	mis.	n° denti	A (mm)	H (mm)
39345	6	4	10.4	19
39346	8	6	12.4	19
39347	10	6	14.4	19
39349	25	22	30	23


CAMBRA PER LEGAMENTI

CROMO-COBALTO

STERILE

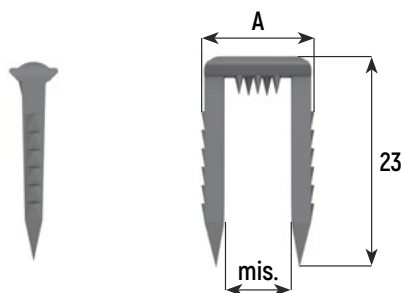

Codice	mis.	A (mm)	n° denti
3935	6	10.4	3
3936	8	12.4	5
3937	11	15.4	7
3938	16	20.4	11

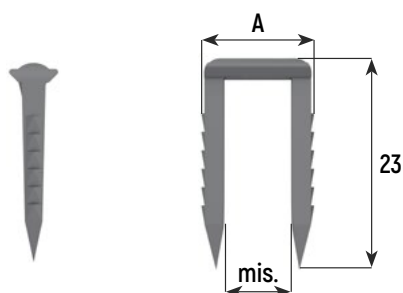

Codice	mis.	A (mm)
3939	6	10.4
39391	8	12.4
39392	11	15.4
39393	16	20.4

Strumentario



NE85060 Battitore cambre

Cambra a 4 punte a testa quadrata

ACCIAIO



Codice	altezza (mm)
3940	10
3941	15
3942	20
3943	25

Cambra a 4 punte a testa rotonda

ACCIAIO



Codice	altezza (mm)
3907	10
39071	15
39072	20
39073	25

Strumentario



3945 Battitore cambre filettate

CAMBRA A SEZIONE TRIANGOLARE

ACCIAIO 

INDICAZIONI

Le cambre a sezione triangolare in acciaio sono indicate per l'osteosintesi di fratture e osteotomie.



PLANNING PREOPERATORIO

Eseguire un attento piano preoperatorio e selezionare la misura idonea all'impianto.

La presenza delle punte nella parte terminale degli steli consente una facile penetrazione nell'osso corticale senza necessità di preforatura.

IMPIANTO

Dopo aver selezionato la cambra da impiantare, utilizzare l'apposito battitore che consente un perfetto collegamento della cambra e ne facilita l'impianto.

Sotto controllo ampliscopico procedere all'impianto assicurandosi che i frammenti ossei siano a perfetto contatto tra loro.

Rimuovere il battitore e assicurarsi del corretto affondamento.

INFORMAZIONI PER ORDINE

ACCIAIO 



Codice	larghezza - altezza	sez. triangolare	Codice	larghezza - altezza	sez. triangolare
3921	9.5 - 12	2	3928	25 - 20	3
3922	12 - 13.5	2	3929	25 - 25	3
3923	15 - 15	2.5	3930	25 - 25	3.5
3924	20 - 15	2.5	3931	30 - 25	3.5
3925	15 - 17	2.5	3932	35 - 25	3.5
3926	20 - 13	2.5	3933	40 - 30	3.5
3927	25 - 20	2.5	3934	45 - 30	3.5

Strumentario



3900 Insertore cambre



3901 Estrattore cambre



3902 Battitore cambre

CAMBRA A SCALINO

CROMO-COBALTO



INDICAZIONI

Le cambre a scalino in cromo -cobalto sono indicate per la sintesi delle osteotomie tibiali.




IMPIANTO

Eseguire l'intervento in fascia ischemica, preceduto in ogni caso da una artroscopia utile a valutare sia lo stato della cartilagine del compartimento interessato che, in particolare, l'integrità del compartimento opposto.

Eseguire una incisione cutanea antero laterale partendo dalla rima articolare esterna e procedendo distalmente.


FIGURA 1

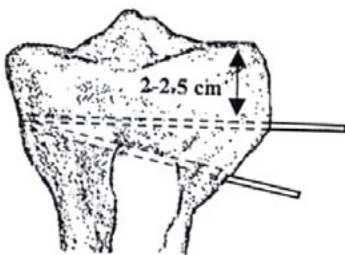

Sotto controllo ampliscopico introdurre un repere parallelo alla rima articolare e successivamente introdurre due fili di K. come reperi per l'osteotomia del cuneo osseo.

Il calcolo del grado di correzione deve essere valutato con un planning preoperatorio.


FIGURA 2

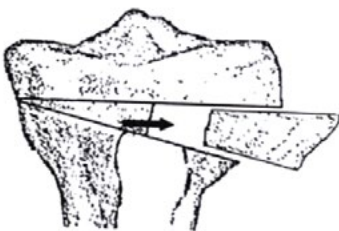

Se i fili di K. risultano in buona posizione eseguire il 50% della osteotomia con una sega e completare con un osteotomo.

Una volta rimosso il cuneo, modificare l'asse tibiale unendo le due rime di osteotomia.

FIGURA 3

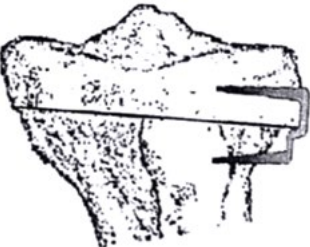

Procedere all'applicazione di una o due cambre a scalino per mantenere la correzione ottenuta.


Assicurandosi che la cambra selezionata sia correttamente vincolata al battitore procedere battendo in modo uniforme fino al completo contatto con l'osso.

Rimuovere il battitore e controllare il corretto affondamento.

CAMBRA A SCALINO

INFORMAZIONI PER ORDINE

CROMO-COBALTO

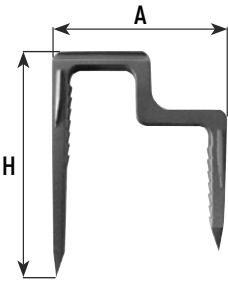

Codice	scalino (mm)	A (mm)	H (mm)
39395	5	30	35
39396	10	30	40
39397	15	30	45

Strumentario



NE85060 Battitore cambre

CAMBRA TIPO BLOUNT

CROMO-COBALTO



INDICAZIONI

Le cambre tipo Blount in cromo-cobalto sono indicate per il trattamento delle epifisiodesi.



IMPIANTO

Dopo un attento piano preoperatorio procedere con la tecnica chirurgica sotto controllo ampliscopico.

Selezionare la corretta misura che consenta un saldo ancoraggio alla corticale e una buona distanza dalla cartilagine.


Inserire due o tre cambre tipo Blount facendo attenzione che gli steli delle cambre siano paralleli alla cartilagine di accrescimento e che la cartilagine venga a trovarsi esattamente tra gli steli di ogni cambré.

Durante il posizionamento con apposito battitore bisogna porre particolare attenzione ad evitare lo scollamento del periostio o l'apertura della capsula articolare.

INFORMAZIONI PER ORDINE

CROMO-COBALTO

STERILE

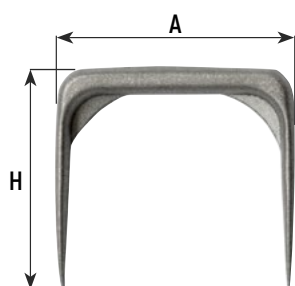

Codice	A (mm)	H (mm)
39541	10	22
39542	16	22
39543	22	22
39544	28	22

Cambre



INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

DISTRIBUTORE